

Gebrauchsanweisung für weiche Kontaktlinsen

1) Bevor Sie Kontaktlinsen verwenden

- Bitte keine Kontaktlinsen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum oder aus beschädigten Originalverpackungen verwenden. Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf der Verpackung.
- Beim Schlafen niemals Kontaktlinsen tragen.
- Tauschen Sie Ihre Kontaktlinsen regelmäßig gemäß den Vorgaben des Herstellers/ Kontaktlinsenanpassers.
- Wenn Sie Kontaktlinsen mit unterschiedlichen Stärken haben, achten Sie bitte darauf, diese nicht zu verwechseln.

2) Besondere Hinweise

- Falls Sie Probleme mit Ihren Kontaktlinsen haben, sprechen Sie grundsätzlich mit Ihrem Kontaktlinsenanpasser oder Augenarzt.
- Auf das Auge oder die Kontaktlinsen dürfen keine Kosmetika (z. B. Haar- und Hautpflegemittel) gelangen.
- Kontaktlinsen sind mechanisch empfindlich.
- Niemals beschädigte Kontaktlinsen tragen.
- Kontaktlinsen nicht austrocknen lassen oder im angetrockneten Zustand aufsetzen.
- Kontaktlinsen können durch das Reiben der Augen verrutschen.
- Immer die eigenen Kontaktlinsen verwenden.
- Eine Brille als Ersatz der Kontaktlinsen bereithalten, v. a. beim Autofahren.
- Wir empfehlen Ihnen eine regelmäßige Überprüfung durch Ihren Kontaktlinsenanpasser.
- Kontaktlinsen nie mit Leitungswasser abspülen.

3) Einsetzen der Kontaktlinsen (am rechten Auge)

- Bitte waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.
- Schließen Sie zunächst den Abfluss Ihres Waschbeckens. Öffnen Sie die Verpackung der Kontaktlinsen bitte wie vorgeschrieben.
- Die Kontaktlinsen liegen in Flüssigkeit. Gießen Sie bitte den Inhalt in Ihre Hände. Die Flüssigkeit muss abfließen, so dass Sie nur noch die Kontaktlinsen in Händen halten.
- Hinweis bei weichen Kontaktlinsen: Der Rand der Kontaktlinsen muss gerade nach oben zeigen. Ist die Wölbung leicht nach außen, müssen Sie die Kontaktlinsen umstülpen.
- Die Kontaktlinsen müssen mit Flüssigkeit gesättigt sein. Spülen Sie deshalb Ihre Kontaktlinsen vor dem Aufsetzen mit Ihrer Kontaktlinsenlösung ab.
- Zum Aufsetzen der Kontaktlinse legen Sie bitte die Kontaktlinse auf die Spitze Ihres rechten Zeigefingers.
- Mit dem Mittelfinger derselben Hand ziehen Sie das Unterlid weit nach unten. Mit der jeweils anderen Hand (Zeige- und Mittelfinger) heben Sie das Oberlid nach oben.
- Setzen Sie bitte langsam die Kontaktlinse auf die Mitte des Auges.
- Lassen Sie bitte Ihre Lider vorsichtig los und halten dabei das Auge offen.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Kontaktlinse gut sitzt, schließen Sie das Auge und öffnen es wieder. Die Kontaktlinse für das linke Auge auf die gleiche Art aufsetzen.



Nach dem Aufsetzen der Kontaktlinsen:

- Falls Sie ein brennendes Gefühl am Auge haben: Entnehmen Sie bitte die Kontaktlinsen und reinigen Sie sie erneut.
- Falls Sie verschwommen sehen: Setzen Sie bitte Ihre Kontaktlinse ab. Nach Umstülpen der Kontaktlinse, bitte wieder einsetzen.
- Falls Sie ein kratzendes Gefühl haben: Setzen Sie bitte die Kontaktlinse ab und überprüfen Sie die Linse auf Verunreinigungen oder Beschädigungen

4) Absetzen von weichen Kontaktlinsen (am rechten Auge)

- Waschen Sie Ihre Hände bitte gründlich.
- Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach unten und schauen dabei leicht nach oben. Ziehen Sie währenddessen mit dem Mittelfinger der linken Hand das Unterlid leicht nach unten.
- Verschieben Sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand die Kontaktlinse nach unten in die untere Augenhälfte.
- Die Kontaktlinse mit dem Daumen und dem Zeigefinger leicht falten und vom Auge herausnehmen.
- Die Kontaktlinsen immer in die gründlich gereinigten Kammern (rechts / links) des Aufbewahrungsbehälters ablegen. Die Kontaktlinse für das linke Auge auf die gleiche Art absetzen.

5) Kontaktlinsenpflege und Aufbewahrung

- Bitte beachten Sie für die Pflege und Aufbewahrung der Kontaktlinsen nur die vom Hersteller Ihres Pflegesystems vorgegebenen Anwendungshinweise.
- Wir empfehlen Ihnen eine systematische Pflege und sichere Pflege sowie eine hygienische Aufbewahrung der Kontaktlinsen.

6) Wechselwirkung mit anderen Mitteln

- Verwenden Sie ausschließlich Pflegesysteme, die von Ihrem Optiker empfohlen wurden und mit denen Ihre Linsen verträglich sind. Somit können Sie unerwünschte Wechselwirkungen der Kontaktlinsen mit Pflegemitteln vermeiden.
- Arzneimittel können eine Veränderung des Tränenfilms bewirken und so die Verträglichkeit der Kontaktlinsen beeinflussen.
- Teilen Sie Ihrem Kontaktlinsenanpasser mit, welche Arzneimittel Sie verwenden.
- Wenn Sie Augentropfen verwenden, sind die Hinweise in der Packungsbeilage zu beachten.

Die Kontaktlinsen weisen eine sehr gute Deckkraft auf und sind daher sowohl für helle als auch für dunkle Augen sehr gut geeignet. Die hohe Sauerstoffdurchlässigkeit der weichen Kontaktlinsen und der hohe Wassergehalt von 45% verhindern ein schnelles Austrocknen der Kontaktlinsen und erhöhen den Tragekomfort.

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Regeln und Merksätze dienen nur Ihrer Orientierung. Sie können keinesfalls eine Anpassung Ihrer Kontaktlinsen durch einen Kontaktlinsenanpasser, Optiker oder Augenarzt ersetzen. Sie bestätigen mit dem Kauf, dass die Erstanpassung durch einen Fachmann (Augenarzt oder Augenoptikermeister) sichergestellt ist, dass Sie Kontaktlinsenträger sind und sich mit Kontaktlinsen sowie deren Handhabung, korrekter Pflege und Hygiene und Tragezeiten auskennen. Die Kontaktlinsen sind keine Korrekturlinsen. Sie werden ohne Sehstärke in steriler Kochsalzlösung geliefert. Nach dem Öffnen können sie bei sachgemäßer Behandlung (Aufbewahrung in einer Kombilösung für weiche Kontaktlinsen) ein Jahr lang beliebig oft getragen werden. Dazu benötigen Sie noch die Aufbewahrungs / Reinigungslösung und die Aufbewahrungsbox. Diese können Sie ebenfalls bei uns erwerben.

Die Kontaktlinsen sind für den Straßenverkehr nicht geeignet!

Hygieneprodukt – daher ist von der Rückgabe ausgeschlossen

Kostümpalast übernimmt keinerlei Haftung für diese Gebrauchsanweisung oder Folgen, die durch eine unsachgemäße Verwendung von Kontaktlinsen entstehen.

Kostümpalast GmbH - Max-Eyth-Str. 1 - D-71691 Freiberg
Tel. +49 (0)7141 7024472 Fax +49 (0)7141 7024473
email: info@kostuempalast.de www.kostuempalast.de
HRB 739456 Amtsgericht Stuttgart, USt-ID DE 232063523
Geschäftsleitung: Anne Perius, Nicole Spintler